

Sterilizator cu Abur Dr. Brown's pentru Microunde

CURATAREA SI ASAMBLAREA

- Dezasamblati in intregime toate partile sticlutei inainte de fiecare utilizare.
- Spalati toate partile in apa fierbinte si cu detergent.
- Curatati cu grija tetinele, inserturile si rezervoarele asigurandu-va ca fiecare canal este curat si clar. Asigurati-va sa urmati instructiunile care le-ati primit impreuna cu sticluta.
- Clatiti capacul, recipientul pentru aburi si partea de jos a sterilizatorului cu apa curata.
- Pune-ti recipientul pentru aburi in partea de jos a sterilizatorului, apoi rasuciti la 90 grade asigurandu-va ca e sigura si intr-o pozitie fixa (Vezi diagrama A de la instructiunile in lb. engleza)
- Turnati 170 ml apa in centrul capacului de jos. Utilizati o sticla gradata pentru a masura corect.

Atentionare: Niciodata nu puneti alt lichid decat apa de la robinet in sterilizator.

Nota: Gresiti daca nu adaugati cantitatea de apa corecta deoarece acest lucru poate cauza deteriorari produselor si / sau cuptorului cu microunde.

Pentru utilizarea sticlutei cu gat larg si a accesoriilor acestora

- Pot fi sterilizate pana la 4 sticle cu gat larg in acelasi timp.
- Puneti sticla cu gat larg cu fata in jos si direct in canalul cu "+". (vezi diagrama B de la instructiunile in lb. engleza).
- Introduceti tetina in gulerul ei apoi plasati-o intre sticlute (vezi diagrama C de la instructiunile in lb. engleza). Nota: dupa sterilizare, tineti separat cealalta parte a gulerului sticlei cand reasamblati biberonul pentru a evita contaminarea tetinei.

- Puneti inserturile cu fata in jos intre sticlute (capacele trebuie pozitionate in jos) dupa aceea aseaza-le in mijlocul farfuriei cu aburi. (vezi diagrama D de la instructiunile in lb. engleza)
- Puneti rezervoarele cu tetinele si sticlutele, apoi pozitionati elementele despartitoare intre sticlute.(vezi diagrama E de la instructiunile in lb. engleza)

Pentru utilizarea sticlutei Standard si a accesoriilor acestora

- Pana la 4 sticle standard pot fi sterilizate in acelasi timp.
- Apasati sticlutele in formele deja existente ale farfuriei cu aburi astfel incat ele sa aiba o sustinere buna in unghi de 30-40 de grade. (vezi diagrama F)
- Introduceti tetina in gulerul ei apoi plasati-o in canalul cu "+". (vezi diagrama G de la instructiunile in lb. engleza)
- Nota: dupa sterilizare, tineti cealalta parte a gulerului sticlei cand reasamblati biberonul pentru a evita contaminarea tetinei.
- Puneti inserturile cu fata in jos intre sticlute si gulerul ei (vezi diagrama H de la instructiunile in lb. engleza)
- Capacele pot fi plasate in mijlocul farfuriei cu aburi (vezi diagrama I de la instructiunile in lb. engleza)
- Puneti rezervoarele cu tetinele si gulerul sticlutei, apoi pozitionati-le langa elementele despartitoare vezi diagrama J de la instructiunile in lb. engleza)

INSTRUCTIUNI pentru cuptorul cu microunde

- Dupa pozitionarea corecta a sticlutei si a partilor accesorii, puneti capacul pe sterilizator si introduceti-l in cuptorul cu microunde. Nota: Sterilizatorul trebuie plasat in centrul cuptorului cu microunde.
- Timpul exact necesar pentru sterilizarea sticlutei depinde de puterea cuptorului cu

microunde. Va rugam vedeti tabelul de mai jos pentru a stabili timpul corect

- Atentionare: Asteptati cel putin 3 minute dupa ce sterilizarea s-a efectuat inainte de a lua sterilizatorul din cuptorul cu microunde pentru prevenirea riscului de ardere. Tineti-l departe de copii.

Tabelul de sanitizare

Puterea cuptorului cu microunde	Apa	Timpul de sterilizare	Timp de racire
1000-1100W	170 ml	5	3
800-900 W	170 ml	6	3
500-700 W	170 ml	8	3

NOTA. Sterilizator cu Abur pentru Microunde Dr. Brown's este special creat pentru sticlutele Dr. Brown's si accesoriile acestora.

Unic importator si distribuitor in Romania:

Intermed Consulting SRL,
Blv. Unirii Nr.7/20, Baia Mare, Maramures
Fax : 0262.22.03.03, Mobil : 0720.14.81.22
E-mail : info@drbrowns.ro, web: www.drbrowns.ro